

Chorus Trio

Katalogové číslo: 81200

Skladování: RT

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Informace o přístroji:

- Dotyková LCD obrazovka, zabudovaná čtečka čárových kódů, zabudovaná termotiskárna.
- Oboustranná komunikace s laboratorním informačním systémem (RS-232 sériový port).
- Senzory hladiny roztoků, monitorování přítomnosti vzorku.
- Koncept identifikace čárových kódů.
- Automatické rozpoznání typu vyšetření, šarže a expirace, jednobodová kalibrace.
- Vyšetření 1-30 vzorků v jednom běhu.
- Až 30 různých typů vyšetření v jednom běhu.
- Archivace všech dat posledních 50 běhů.
- Uložení kalibrace dvou různých šarží pro každý typ vyšetření.

Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
2. Manuální pipetování vzorku.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>