

CHORUS VIT B12

Katalogové číslo: 86400

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Obecné informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagentie (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků v pg/ml, kalibrační rozsah: 150,0-2000,0 pg/ml.

Stručný pracovní postup:

- Připravte vzorky, kalibrátor, pozitivní kontrolu a negativní kontrolu (je-li to nutné) pomocí výrobku CHORUS VITAMIN EXTRACTION (REF 86500) podle extrakčního protokolu uvedeného v příslušném návodu k použití.
- Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
- Manuální pipetování vzorku.
- Vložení testu do přístroje.
- Spuštění přístroje.
- Tisk výsledků v průběhu 120 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>