

CHORUS VITAMIN EXTRACTION

Katalogové číslo: 86500

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



1. Nadávkuje do zkumavky (není součástí dodávky) 100 µl vzorku k extrakci.
2. Smíchejte stabilizační pufr (Stabilizing Agent) a uvolňovací pufr (Releasing Agent) a připravte extrakční roztok v poměru 1/40 (Stabilizing/Releasing). Například pro extrakci 6 vzorků smíchejte 10 µl stabilizačního pufru a 390 µl uvolňovacího pufru. Roztok 1/40 je stabilní při pokojové teplotě po dobu 8 hodin od přípravy.
3. Nadávkuje do zkumavky 50 µl předem připraveného extrakčního činidla.
4. Protřepejte 3 krát ve vortexu po dobu 1-2 sekundy ihned po přidání extrakčního činidla.
5. Inkubujte 15 minut při pokojové teplotě.
6. Nadávkuje do zkumavky 50 µl neutralizačního pufru.
7. Protřepejte 3 krát ve vortexu po dobu 1-2 sekundy ihned po přidání neutralizačního pufru.
8. Použijte extrahovaný vzorek, jak je uvedeno v IFU soupravy, která má být použita.